

**Verpakkingsinstructie uitstrijkmetaal (Thin Prep methode)****Stap 1**

Breng materiaal over in Thin Precontainer, gevuld met preservatievloeistof

**Stap 2**


Voeg velletje absorberend materiaal toe

**Stap 3**

Verpak Thin Prep container en absorberend materiaal in safetybag; in het grootste vak van het zakje:



Indien geen digitale aanvraag: plaats het aanvraagformulier in het vakje ernaast:

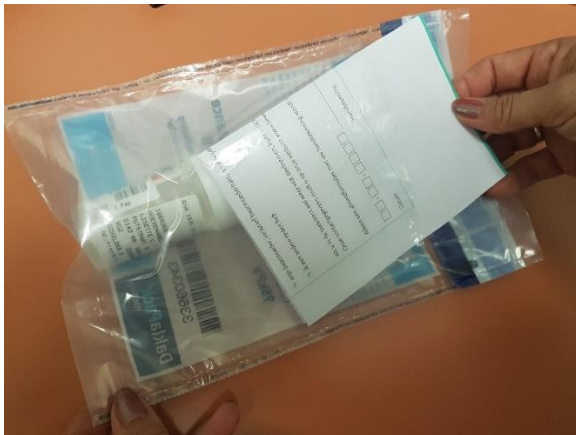

**Stap 4**

Verwijder afdekstrip van de safetybag



**Stap 5**

Druk voor- en achterzijde van de safetybag goed aan



**Stap 6**

Verpak safetybag in een Polymed verzendetui

**Stap 7**

Plaats adreskaartje met de juiste zijde vóór in het verzendetui

**Stap 8**

Sluit Polymed verzendetui met zipper



Het diagnostisch monster is nu klaar om verstuurd te worden.

### Verpakkingsinstructie histologisch materiaal

#### Stap 1

Breng materiaal over in verzendpotje, gevuld met gebufferde formaline



#### Stap 2

Voeg velletje absorberend materiaal toe. **N.B. Verzendpotje niet omwickelen met absorberend materiaal, maar velletje los bijvoegen!!**




#### Stap 3

Verpak potje en absorberend materiaal in safetybag; in het grootste vak van het zakje:



Indien geen digitale aanvraag: plaats het aanvraagformulier in het vakje ernaast:

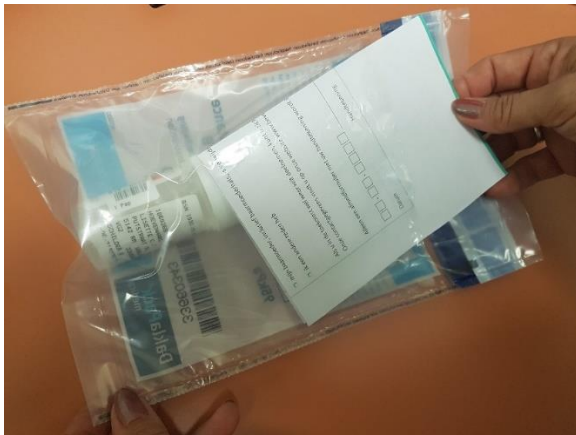

**Stap 4**

Verwijder afdekstrip van de safetybag



**Stap 5**

Druk voor- en achterzijde van de safetybag goed aan



**Stap 6**

Verpak safetybag in een Polymed verzendetui



**Stap 7**

Plaats adreskaartje met de juiste zijde vóór in het verzendetui



**Stap 8**

Sluit Polymed verzendetui met zipper



Het diagnostisch monster is nu klaar om verstuurd te worden.

**Verpakkingsinstructie preparaten**

**Stap 1**

Plaats preparaten in preparatenmapje



**Stap 2**

Sluit preparatenmapje goed




**Stap 3**

Verpak preparatenmapje in safetybag; in het grootste vak van het zakje:





Indien geen digitale aanvraag: plaats het aanvraagformulier in het vakje ernaast:

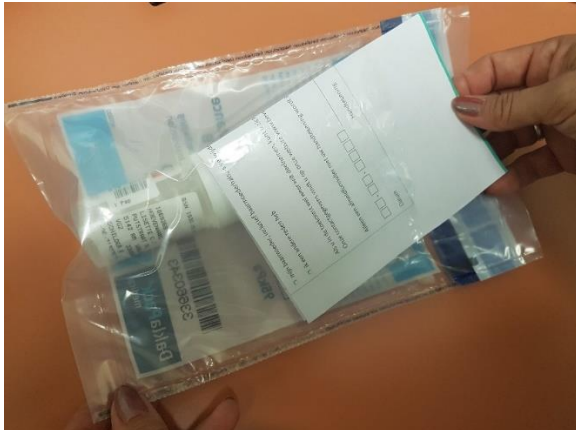

**Stap 4**

Verwijder afdekstrip van de safetybag



**Stap 5**

Druk voor- en achterzijde van de safetybag goed aan



**Stap 6**

Verpak safetybag in een Polymed verzendetui



**Stap 7**

Plaats adreskaartje met de juiste zijde vóór in het verzendetui

**Stap 8**

Sluit Polymed verzendetui met zipper



Het diagnostisch monster is nu klaar om verstuurd te worden.