

Verpakkingsinstructie uitstrijk materiaal (Thin Prep methode)**Stap 1**

Breng materiaal over in Thin Precontainer, gevuld met preservatievloeistof

**Stap 2**

Voeg velletje absorberend materiaal toe

**Stap 3**

Verpak Thin Prep container en absorberend materiaal in safetybag; in het grootste vak van het zakje.

Let op: gebruik voor iedere Thin Prep container een aparte safetybag.



Indien geen digitale aanvraag: plaats het aanvraagformulier in het vakje ernaast:



Stap 4

Verwijder afdekstrip van de safetybag



Stap 5

Druk voor- en achterzijde van de safetybag goed aan



Stap 6

Verpak safetybag in een Polymed verzendetui

**Stap 7**

Plaats adreskaartje met de juiste zijde vóór in het verzendetui

**Stap 8**

Sluit Polymed verzendetui met zipper



Het diagnostisch monster is nu klaar om verstuurd te worden.

Verpakkingsinstructie histologisch materiaal

Stap 1

Breng materiaal over in verzendpotje, gevuld met gebufferde formaline



Stap 2

Voeg velletje absorberend materiaal toe. **N.B. Verzendpotje niet omwickelen met absorberend materiaal, maar velletje los bijvoegen!!**




Stap 3

Verpak potje en absorberend materiaal in safetybag; in het grootste vak van het zakje:
Let op: gebruik voor ieder (order) verzendpotje een aparte safetybag



Let op: gebruik voor ieder (order) potje een aparte safetybag

Indien geen digitale aanvraag: plaats het aanvraagformulier in het vakje ernaast:

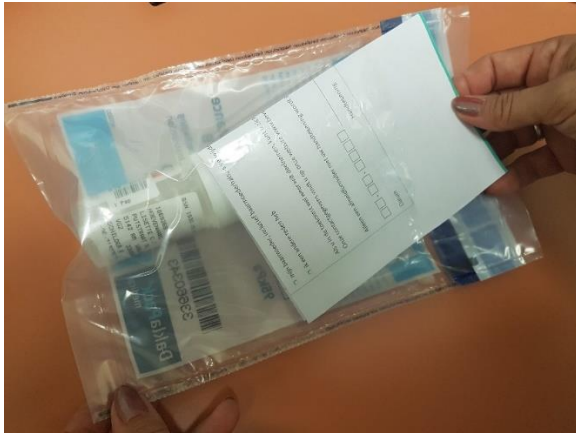

Stap 4

Verwijder afdekstrip van de safetybag



Stap 5

Druk voor- en achterzijde van de safetybag goed aan



Stap 6

Verpak safetybag in een Polymed verzendetui



Stap 7

Plaats adreskaartje met de juiste zijde vóór in het verzendetui



Stap 8

Sluit Polymed verzendetui met zipper



Het diagnostisch monster is nu klaar om verstuurd te worden.

Verpakkingsinstructie preparaten**Stap 1**

Plaats preparaten in preparatenmapje

**Stap 2**

Sluit preparatenmapje goed

**Stap 3**

Verpak preparatenmapje in safetybag; in het grootste vak van het zakje:



Indien geen digitale aanvraag: plaats het aanvraagformulier in het vakje ernaast:



Stap 4

Verwijder afdekstrip van de safetybag



Stap 5

Druk voor- en achterzijde van de safetybag goed aan



Stap 6

Verpak safetybag in een Polymed verzendetui



Stap 7

Plaats adreskaartje met de juiste zijde vóór in het verzendetui



Stap 8

Sluit Polymed verzendetui met zipper



Het diagnostisch monster is nu klaar om verstuurd te worden.